

# IRIPLUS



**GOCCE OCULARI STERILI**

Flacone multidose da 10 ml

*LENITIVE, PROTETTIVE, RINFRESCANTI, ANTIARROSSAMENTO*

*Sollievo immediato e prolungato*

**A base di Sodio ialuronato 0,4%.**

**Contiene Acque distillate di Camomilla, Malva, Hamamelis, Mirtillo**



**EASYDROP®**

Iriplus è compatibile con le lenti a contatto

I fattori fisici ambientali (vento, esposizione prolungata ai raggi solari, fumo di sigaretta, inquinamento, aria secca, salsedine o acqua di mare o della piscina), lo stress visivo (intenso impegno della vista da eccessivo lavoro, studio ed utilizzo del computer) ed i fattori meccanici (uso prolungato di lenti a contatto), possono provocare sensazioni di arrossamento, bruciore, secchezza, affaticamento oculare.

**IRIPLUS** gocce oculari sterili grazie all'azione del sodio ialuronato ad alta concentrazione (0,4%) che protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare, assicura sollievo immediato e prolungato in caso di tali disturbi.

#### **INDICAZIONI:**

IRIPLUS gocce oculari sterili è indicato per proteggere, umidificare e lubrificare la superficie oculare, assicurando sollievo immediato e prolungato in caso di arrossamento, bruciore, secchezza e affaticamento oculare.

#### **COMPOSIZIONE:**

**100 ml di soluzione contengono:** Acido ialuronico sale sodico 0.4 g, Acqua distillata di Camomilla, Acqua distillata di Hamamelis, Acqua distillata di Malva, Acqua distillata di Mirtillo, Acido bórico, Sodio borato, Sodio edetato, Sodio cloruro, Potassio cloruro, Sodio idrossimetilglicinato, Acqua depurata.

#### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

Dopo aver lavato bene le mani col sapone, aprire il flacone e instillare nel sacco lacrimale una o due gocce per occhio esercitando una leggera pressione sul corpo del flacone. Dopo l'uso richiudere bene il flacone e non utilizzare oltre 28 giorni dalla data di prima apertura.

**Per i portatori di lenti a contatto:** Iriplus è compatibile con le lenti a contatto. Somministrare prima di indossare le lenti a contatto.

**POSOLOGIA:** Si può usare 2 o 3 volte al giorno oppure secondo prescrizione medica.  
**Durata di utilizzo:** il prodotto è indicato per un utilizzo a breve termine.  
 Se la sintomatologia dovesse persistere consultare il medico.

**AVVERTENZE E MISURE PRECAUZIONALI:** Il prodotto è solo per uso oftalmico. Non ingerire.

- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Per l'utilizzo nei bambini, per l'uso in gravidanza e durante l'allattamento consultare preventivamente il medico.
- Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione del prodotto e l'eventuale instillazione di farmaci per uso oftalmico esterno.
- Utilizzare entro 28 giorni dalla prima apertura.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente indicato nella "Composizione".
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- In rari casi si è osservato un fugace offuscamento della vista all'instillazione dovuto all'alto contenuto di sodio ialuronato, esso tuttavia scompare molto rapidamente.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.
- In caso di uso prolungato (4 settimane) consultare il medico se il discomfort oculare persiste.

Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.

**CONSERVAZIONE:** Conservare nella confezione originale.



**EFFETTI COLLATERALI:** Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto.

Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. In caso si manifestassero effetti collaterali consultare il medico.

**CONFEZIONE:** Un flacone multidose da 10 ml.

**ALTRE CONFEZIONI:** Collirio monodose, 3 strip con 5 contenitori da 0,33 ml.

Fabbricante



**Chemist's Research s.r.l.**  
 Via Leuca, 13  
 73020 Castromediano (Le)  
 info@chemistresearch.it

**CE 0546**

**DISPOSITIVO MEDICO**

classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti.

**STERILE A**



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Data ultima revisione:  
 Gennaio 2021

**LEGENDA SIMBOLI**



Numero di lotto



Data di scadenza



Fabbricante



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso



Leggere attentamente le avvertenze



Non utilizzare in caso di confezione danneggiata

**STERILE A**

Sterilizzato con tecniche di fabbricazione asettiche



Temperatura consigliata tra 5° e 30°C