

provetta urine

**URI
CHECK**

chemist's research




CR_REV.01_02/2021



chemist's research

**URI
CHECK**

provetta urine

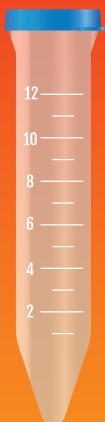

12 ml



VERIFICHE PREVENTIVE PRIMA DELL'USO

Accertarsi prima dell'uso e quindi all'atto del disimballo, che il raccogliatore:

- abbia presente e leggibile l'etichettatura con il numero di LOTTO e la data di SCADENZA entro la quale il prodotto deve essere utilizzato;
- abbia il proprio tappo posizionato in sede;
- abbia le parti integre e non danneggiate;
- non abbia cambiato colore o assunto colorazioni non uniformi;
- non presenti macchie superficiali, parti o corpi estranei all'interno della confezione.

Monouso.

Consultare le istruzioni d'uso. Vietato qualsiasi uso improprio.

Conservare in un luogo fresco e oscuro. Conservare istruzioni, imballo ed etichettature.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Cod. CUP:


981954670



chemist's research

**URI
CHECK**

provetta urine

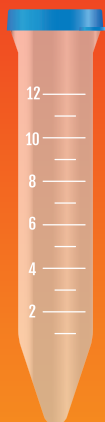

12 ml



MODO D'USO DEL CONTENITORE A CURA DELL'UTILIZZATORE (PAZIENTE)

Non toccare con le mani le parti interne del raccogliatore e del rispettivo tappo di chiusura, durante tutte le fasi del prelievo e fino alla chiusura dello stesso.

Prima di iniziare il prelievo si consiglia, fatti salvi gli obblighi dettati dal personale medico, di procedere ad un'accurata pulizia delle parti intime, lavandosi con acqua e sapone e sciacquandosi abbondantemente con acqua. Il contenitore garantisce la raccolta di massimo 12 ml di urina.

Non tentare di riparare il raccogliatore danneggiato; in tale evenienza il dispositivo va rottamato.

Al termine delle operazioni di prelievo lavarsi sempre le mani con acqua e sapone.



For.me.sa. Srl
Via Canelli, 6 - 43015 Noceto PR
Tel. +39 0521 628482
www.formesa.it

Prodotto per Chemist's Research
www.chemistresearch.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN
ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



chemist's research



IVD Made in Italy
REF FOR.001.005



02/2026

LOT 210248