

40 ml
SPRAY NO GAS

Fluimar

decongestionante **RAFFREDDORE E ALLERGIE**
Spray nasale ipertonico con acqua di mare

Fluimar decongestionante RAFFREDDORE E ALLERGIE è uno spray nasale senza gas propellenti contenente acqua di mare ipertonica, oli essenziali di eucalipto e di menta e gel di aloe.

Fluimar decongestionante RAFFREDDORE E ALLERGIE è particolarmente indicato per la pulizia delle fosse nasali in quanto facilita la progressiva rimozione delle secrezioni nasali. L'acqua di mare ipertonica, per effetto osmotico, aiuta a ridurre la congestione della mucosa nasale recando sollievo e facilitando la respirazione in caso di raffreddori, sinusiti e allergie. Grazie alla presenza di gel di aloe idrata la mucosa nasale contrastando le secchezze delle cavità nasali, gli oli essenziali di menta ed eucalipto assicurano una azione rinfrescante.

Indicazioni: Fluimar decongestionante RAFFREDDORE E ALLERGIE è utile in caso di raffreddori, sinusiti e allergie per favorire un efficace e naturale sollievo dalla congestione nasale e facilitare la pulizia delle cavità nasali.

Composizione: Acqua di Mare, Gel di Aloe, Olio essenziale di Eucalipto, Olio essenziale di Menta, Sodio Cloruro, Polisorbato 20, Acido Lattico, Sodio Benzoato, Potassio Sorbato. Non contiene gas propellenti.

Modalità di applicazione

1. Soffiare il naso.
2. Agitare il flacone prima dell'uso.
3. Rimuovere il cappuccio di protezione dello spray.
4. Prima di utilizzarlo per la prima volta premere l'erogatore più volte fino a quando viene rilasciato uno spruzzo uniforme nell'aria facendo attenzione a non spruzzare negli occhi o in bocca.
5. Tenere il flacone dritto con il pollice sotto la base e l'erogatore tra due dita.
6. Piegare la testa leggermente in avanti e introdurre l'erogatore nella narice.
7. Spruzzare mentre si respira e inspirare leggermente attraverso il naso.
8. Ripetere l'operazione nell'altra narice.
9. Lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto senza soffiare il naso.
10. Dopo ogni uso lavare l'erogatore con acqua calda, asciugare e rimettere il cappuccio di protezione.
11. 1 spruzzo per narice fino a 6 volte al giorno.

Avvertenze

- Il prodotto è per uso nasale, utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso.
- Per l'uso nei bambini di età inferiore ai sei anni, in gravidanza e durante l'allattamento, consultare preventivamente il medico.
- L'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; nel caso in cui fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni dovessero manifestarsi è indicato sospendere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Prima di utilizzare il prodotto dopo un intervento chirurgico o una lesione al naso consultare il medico.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.

Conservazione: Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e al riparo della luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Effetti collaterali: Non sono noti nè previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. In caso di comparsa di fastidi persistenti consultare il medico.

Confezione: Flacone da 40 ml.



chemist's research



Fabbricante:
Chemist's Research s.r.l.
Via Leuca, 13 - 73020 Cavallino (LE)



CR_REV01_01/2020