

Glycolax®

microclismi ADULTI

a base di GLICEROLO CAMOMILLA e MALVA

DISPOSITIVO MEDICO 

Composizione: Ogni contenitore contiene: Glicerolo, Amido di frumento, estratto fluido di Malva, estratto fluido di Camomilla, Acqua depurata.

Meccanismo d'azione: Movimenta e lubrifica la massa fecale e ne facilita l'espulsione con effetto emolliente.

Controindicazioni: I Microclismi non devono essere usati nei casi di dolore addominale acuto o di origine sconosciuta.

Effetti collaterali: In pazienti particolarmente sensibili o nei casi di mucosa precedentemente infiammata, si può riscontrare irritazione della mucosa del retto.

Dosaggio: 1 o 2 contenitori monodose nelle 24 ore.

Modo d'uso: Ogni contenitore monodose di GLICEROLO CAMOMILLA e MALVA è singolarmente sigillato sino al momento dell'uso; ciò garantisce l'igiene e la praticità di utilizzo. Per aprire il contenitore monodose basta afferrare il colletto e ruotare il cappuccio per estrarlo. Durante la manipolazione non afferrare il soffiutto, ciò per evitare la fuoriuscita del prodotto al momento dell'apertura. Lubrificare la cannula con una goccia della soluzione stessa, introdurre la cannula nel retto e premere il soffiutto. Estrarre mantenendo premuto il soffiutto e gettare.

Conservazione: Conservare in luogo fresco, asciutto, a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore ed al riparo da luce solare diretta.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

LEGENDA SIMBOLI



Attenzione, leggere attentamente il foglio illustrativo



Numero del lotto



Non riutilizzare



Data di scadenza



30°C
4°C
Conservare tra 4° e 30° C



Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso



Fabbricante



Consultare le istruzioni per l'uso



Fabbricante

Chemist's Research S.r.l.
Via Leuca, 13
73020 Cavallino (LE) ITALY

