



chemist's research

SALVADERMA

MEDICAL 15%

Estratto acquoso di Triticum vulgare

Tubo da 32 g

Salvaderma Medical 15% Crema è un dispositivo medico utile per la **medicazione di ferite ed ustioni superficiali**. La combinazione dell'estratto acquoso di Triticum vulgare e dei Macrogol crea un sistema di riserva di acqua in grado di assicurare un ambiente umido sulla lesione, condizione necessaria per ottenere il corretto processo di cicatrizzazione.

Salvaderma Medical 15% Crema è in grado di ripristinare il potere idrofilo complessivo dello strato corneo in casi di alterazione fisiopatologica della cute quali **dermatiti, eritemi da pannolino, eritemi solari, irritazioni da agenti esterni** (agenti atmosferici, trattamenti estetici).

INDICAZIONI: Salvaderma Medical 15% crema è un dispositivo medico per la medicazione delle ustioni superficiali e delle lesioni cutanee di varia natura che promuove la guarigione mantenendo il giusto grado di umidità della ferita.

COMPOSIZIONE: 100 g di crema contengono:

Componente funzionale: Estratto Acquoso di Triticum vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100ml) 15g.
Eccipienti: 2-fenossietanolo 1%, Macrogol 400-glicole polietilenico, Macrogol 1500, Macrogol 4000, Paraffina liquida, Alcool cetilico, Alcool stearilico, Glicerina, Acqua depurata.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Lavarsi bene le mani. Prelevare dal tubo un po' di prodotto e distribuirlo delicatamente sulla ferita e nelle immediate vicinanze. Coprire con garza. Ripetere l'operazione una o due volte al giorno fino a completa guarigione.

AVVERTENZE:

- Il prodotto è per uso esterno e destinato all'uso dermatologico.
- Non utilizzare in caso di lesioni non superficiali che interessano il derma.
- Salvaderma Medical 15% crema non possiede attività battericide.
- Nell'eventualità di utilizzo concomitante di altri prodotti, verificare le interazioni.
- Non usare in caso di ipersensibilità o di allergia individuale verso qualsiasi componente del prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.
- In gravidanza e nei bambini al di sotto dei tre anni il prodotto può essere utilizzato dopo consulto del medico.
- Non utilizzare il prodotto se il tubo, al momento della prima apertura, risultasse danneggiato o non perfettamente integro.
- Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e al riparo della luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza è riportata sulla confezione e sul tubo.

EFFETTI COLLATERALI:

Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. In caso di comparsa di fastidi persistenti consultare il Medico.

CONFEZIONE:

Tubo da 32 g di crema

CR_REV/01_12/2020



Salvaderma Medical 15% è un Dispositivo Medico classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti.



Fabbricante
Chemist's Research s.r.l.
Via Leuca, 13 | 73020 Cavallino (LE)