

contenitore con tappo a vite
URI CHECK

chemist's research



CR_REV.01_04/2022

FOR.115

URI CHECK

contenitore con tappo a vite

VERIFICHE PREVENTIVE PRIMA DELL'USO

Accertarsi prima dell'uso e quindi all'atto del disimballo, che il raccoglitore:

- abbia presente e leggibile l'etichettatura con il numero di LOTTO e la data di SCADENZA entro la quale il prodotto deve essere utilizzato;
- abbia il proprio tappo posizionato in sede;
- abbia le parti integre e non danneggiate;
- non abbia cambiato colore o assunto colorazioni non uniformi;
- non presenti macchie superficiali, parti o corpi estranei all'interno della confezione.

Monouso. Contenitore asettico. Consultare le istruzioni d'uso. Vietato qualsiasi uso improprio. Conservare in un luogo fresco e oscuro. Conservare istruzioni, imballo ed etichettature.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN
ISO 9001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY



chemist's research

URI CHECK

contenitore con tappo a vite

chemist's research



URI CHECK

contenitore con tappo a vite

**MODO D'USO DEL CONTENITORE
A CURA DELL'UTILIZZATORE (PAZIENTE)**

Non toccare con le mani le parti interne del raccoglitore e del rispettivo tappo di chiusura, durante tutte le fasi del prelievo e fino alla chiusura dello stesso.

Prima di iniziare il prelievo si consiglia, fatti salvi gli obblighi dettati dal personale medico, di procedere ad un'accurata pulizia delle parti intime, lavandosi con acqua e sapone e sciacquandosi abbondantemente con acqua. Il contenitore garantisce la raccolta di massimo 120 ml di urina.

Non tentare di riparare il raccoglitore danneggiato; in tale evenienza il dispositivo va rottamato.

Al termine delle operazioni di prelievo lavarsi sempre le mani con acqua e sapone.

 For.me.sa. Srl
Via Canvelli, 6
43015 Noceto PR
www.formesa.it

 Chemist's Research Srl
Via Leuca, 13 - 73020 Cavallino LE
Tel. 0832 231776
www.chemistresearch.it

URI CHECK

contenitore con tappo a vite

chemist's research



120 ml




MADE IN ITALY



    FOR.001.001A

  Astuccio Raccolta carta  Sacchetto Raccolta plastica **MADE IN ITALY**

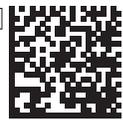

UDI  (01) 08055060762070
(17) 270531
(10) 220511

LOT 220511

 31/05/2027